

## Návod na použitie zdravotníckej pomôcky

### IALUNA®

**IALUNA®** čapíky obsahujú hyaluronát sodný, ktorý napomáha hydratácii sliznice pošvy, vďaka svojej schopnosti zadržiavať vodu. Vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam pomáhajú IALUNA® čapíky udržiavať fyziologickú úroveň hydratácie tkanív, normalizujú prostredie v pošve a napomáhajú lubrikácii, potrebnej k odstráneniu všetkých patofyziologických javov, spájaných so suchosťou pošvy.

### Indikácie

Napomáha obnove neagresívnych stavov pošvy, ako sú podráždenie, svrbenie a nekomplikovaná atrofická vaginitída.

Atrofická vaginitída, spôsobená chemoterapiou.

Pre obnovenie prirodzených fyziologických vnútroškových podmienok po pôrode a gynekologickej operácii.

### Zloženie

Čapíky o 2 g obsahujú:

Hyaluronát sodný; v tukoch rozpustný extrakt z *Centella Asiatica*; v tukoch rozpustný extrakt z *Chamomilla vulgaris*; d,l-alfa tokoferyl acetát; koloidný oxid kremičitý bezvodý; tuhé polosyntetické glyceridy.

### Opis prípravku

Každá krabica obsahuje 2 hliníkové blistre po 5 čapíkov.

### Spôsob použitia

Pred otvorením balenia si dôkladne umyte ruky.

Z blistra vyberte jeden čapík, pričom sa snažte nepoškodiť lôžka ostatných čapíkov.

Jemne si zaveďte čapík do pošvy, snažiac sa zasunúť ho hlboko do pošvy pomocou prstu, aby ste predišli náhodnému priesaku.

### Frekvencia používania

Pokiaľ Váš lekár nestanovil inak, odporúča sa zavádzanie 1 čapíka do pošvy jedenkrát denne. Odporúča sa, aby ste si zaviedli čapík večer pred spaním, aby sa zaistil najlepší účinok pomôcky.

Nepoužívajte **IALUNA®** čapíky dlhodobo. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho lekára.

### Varovania a opatrenia pre použitie

**IALUNA®** čapíky sú iba na vaginálne použitie.

Pred použitím **IALUNA®** čapíkov sa svojho lekára spýtajte, či netrpíte na atopickú alergiu.

Nevystavujte teplotám prevyšujúcim 25 °C.

Nepoužívajte **IALUNA®** čapíky po dátume expirácie, ktorý je uvedený na etikete.

Nepoužívajte **IALUNA®** čapíky, ak je obal otvorený alebo poškodený.

Po použití odstráňte prípravok v súlade s požiadavkami na normálny separovaný odpad.

**UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ**

### **Tehotenstvo**

Nepoužívajte počas tehotenstva, pokiaľ Vám to nenariadi lekár.

### **Interakcie**

Extrakty, nachádzajúce sa v **IALUNA**<sup>®</sup> čapíkoch môžu vzájomne sa ovplyvňovať s niektorými antikoagulanciami s obsahom warfarínu.

Vitamín E v **IALUNA**<sup>®</sup> čapíkoch môže mať synergický účinok s protinádorovými liekmi, zvyšujúc ich účinok.

### **Kontraindikácie**

V súčasnosti nie sú známe žiadne kontraindikácie pre použitie **IALUNA**<sup>®</sup> čapíkov.

Nepoužívajte v prípade známej precitlivenosti na niektorú zložku.

Nepoužívajte pri alergii na *Compositae*.

### **Vedľajšie účinky**

Používanie prípravku **IALUNA**<sup>®</sup> čapíky nemá žiadne vedľajšie účinky.

Ak pri používaní tejto pomôcky zažijete akékoľvek vedľajšie účinky, informujte o tom Vášho lekára alebo lekárnika.

## **DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE PÍ SOMNEJ INFORMÁCIE**

April 2013

Rok CE certifikácie: 2010

### **Obchodné meno výrobcu:**

IBSA FARMACEUTICI ITALIA srl

Via Martiri di Cefalonia, 2

26900 Lodi (LO), Taliansko

info@ibsa.it

### **Meno a adresa ohlasovateľa:**


IBSA Slovakia s.r.o.

Mýtna 42

811 05 Bratislava

Slovenská republika

**Vid' návod na použitie    Nevystavujte teplotám prevyšujúcim 25 °C**

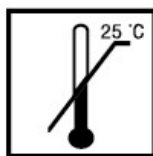

IALUNA sup

**Jednorazové použitie**



**Použiteľné do:**



**CE 0373**